



نگهداشت دستگاه سل کانتر Sysmex در ایام تعطیل

مدل XP



راه های ارتباطی

☎ 021_66008379 021_66098362

🌐 www.roshantebsepanta.com

● خاموش کردن دستگاه XP برای مدت طولانی

شست و شوی دستگاه با آب مقطر برای خاموش کردن به مدت یک هفته حدود نیم لیتر آب مقطر در اختیار داشته باشید.

1- با کد C9.0 منو سرویس را فعال کنید .

2- مسیر Menu _ Service _ Setting Seq _ Deprime Seq را اجرا

3- نمایید.
تیوب های مربوط به محلول رقیق کننده (ایزوتون) و محلول های لیز کننده (لایز) را از ظرف های مربوطه خارج نمایید و در جای کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی قرار دهید .

4- شاسی استارت را فشار دهید تا دستگاه مراحل تخلیه محلول ها را انجام دهد .

5- بعد از اتمام کار ، دستگاه را به وسیله کلید پاور خاموش نمایید .

6- تیوب های مربوط به محلول های ایزوتون و لایز را داخل ظرف آب مقطر قرار دهید .

7- دستگاه را روشن کنید تا مراحل AUTO RINSE کامل اجرا شود .

8- اکنون مجدد مراحل 1 تا 5 را انجام دهید .

9- SRV دستگاه را باز کرده و دو عدد تلق را بین قسمت های ثابت و متحرک SRV قرار دهید و مجموعه ی SRV را روی دستگاه نصب کنید .

10- کابل برق دستگاه را جدا نمایید و کاور دستگاه را روی آن بکشید .



● روشن کردن دستگاه XP بعد از مدت طولانی

1- تیوب های لایز و ایزوتون را داخل محلول های مربوطه قرار دهید .

2- 2 عدد تلق میان قسمت های SRV را برداشته و سپس مجموعه SRV را با دقت ببندید .

3- دستگاه را روشن نمایید و بعد از اجرا مراحل AUTO RINSE دستگاه آماده به کار است .

