



نگهداشت دستگاه سل کانتر Sysmex در ایام تعطیل

مدل K1000



راه های ارتباطی

📞 021_66008379 021_66098362

🌐 www.roshantebsepanta.com

● خاموش کردن دستگاه K1000 برای مدت طولانی

در صورتیکه لازم باشد، دستگاه برای مدت یک هفته یا بیشتر خاموش باشد برای جلوگیری از ایجاد اشکال در سیستم انتقال محلولها (هیدرولیک) و چسبندگی SRV، حتما باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود

1_ شست و شوی دستگاه با آب مقطر برای خاموش کردن یک هفته ای:
حدود نیم لیتر آب مقطر در اختیار داشته باشید.

2_ برنامه هفتم (Setting) را انتخاب کرده و به قسمت چهارم این برنامه (Program Switch) بروید، دومرتبه کلید Enter را فشار دهید تا از SW1, SW2 رد شده و SW3 نمایش داده شود .

3_ اکنون باید برخی از ارقام آن تغییر یابند (شماره ارقام از راست به چپ به ترتیب بیت 1 تا 8 میباشد).

4_ با حرکت دادن مکان نما بوسیله کلید های → و ← کلید (6 یا 4) میتوانید رقم انتخاب شده را به وسیله کلید های ↑ و ↓ کلید (8 یا 2) و یا کلید 0 و 1 مقدار 0 و 1 بدهید طوری که در نهایت ترکیب زیر را برای کلید SW3 داشته باشیم .

SW3 :

0	1	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

سپس برای تایید ترکیب فوق و وارد شدن آن به حافظه کلید Enter را فشار دهید اکنون دستگاه را خاموش کنید.



5- تیوب های مربوط به محلول رقیق کننده (ایزوتون) و محلول های لیزکننده را از ظرف های مربوطه خارج کنید و درجایی کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی قرار دهید.

6- اکنون دستگاه را روشن کنید، دستگاه به صورت خودکار عمل تخلیه محلولها را انجام داده و این کار چندین دقیقه به طول می انجامد وقتی که مرحله فوق به پایان برسد، دستگاه مرحله Auto Rinse را انجام داده و درپایان نوشته NO Diluent را روی صفحه و پرینتر ظاهر میکند که همراه با صدای بوق ممتد است (بازدن کلید C میتوانید بوق ناشی از خطا را قطع کنید)

7- تا این مرحله محلولهای موجود در سیستم هیدرولیک تخلیه شده است.

● اکنون دستگاه را خاموش کنید

8- تیوب های هر سه محلول دستگاه را در داخل ظرف آب مقطر قرار دهید.

9- دستگاه را روشن کرده و پس از اتمام مرحله ی Auto Rinse به قسمت چهارم از برنامه هفتم (Setting_Program Switch) بروید و SW3 را انتخاب کنید.



10 - اکنون مجدداً مراحل را از شماره 4 تا 7 انجام دهید

11 - دستگاه را خاموش کنید

12 - شیر اصلی نمونه گیری (SRV) را پیاده کرده و دو قطعه تلقی را بین قسمت های ثابت و متحرک SRV قرار دهید و مجموعه شیر اصلی را روی دستگاه سوار کنید

13 - تیوب های هر سه محلول دستگاه را در جای کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی محافظت نمایید

● بکار گیری دستگاه بعد از مدت یک هفته یا بیشتر

1 - پس از قرار دادن تیوب ها در داخل محلولهای مربوطه و برداشتن دو قطعه تلقی از میان قسمت های ثابت و متحرک SRV، دستگاه را روشن کنید، پس از اتمام مرحله ی Auto Rinse، به قسمت چهارم منوی هفتم (Setting Program Switch) رفته و ترکیب زیر را برای SW3 وارد کرده و کلید Enter را بزنید.

اکنون دستگاه برای شروع به کار مجدد آماده است.

SW3:

0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

