



# MAINTENANCE CHECK LIST SYSMEX

نگهداشت روزانه

روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	
موارد نگهداری																																
SHOT DOWN																																
چک کردن TRAP دستگاه CHAMBER																																
تمیز کردن نیدل دستگاه با الکل																																

## اقدامات در صورت نیاز

AUTO RINSE	
شست و شوی چمبرها	
تخلیه گالن فاضلاب	

## اقدامات مصرفی تعویضی

محلول ایزتون و لایز	
فیوز	
کاغذ پرینتر	

## اقدامات ۶ ماهه - توسط شرکت پشتیبان

تعویض الکترودها		اجرای دستورکالین سیستم
تعویض قطعات پمپ		تعویض فیلتر ایزتون و AIR FILTER
تعویض lyse Tube		شست و شوی واحد هموگلوبین

## نگهداشت هفتگی

شست و شوی سینی SRV	
شست و شوی RINSE CUP	

## نگهداشت ماهانه - به ازای هر ۲۵۰۰ تست

شست و شوی مخزن فاضلاب_ دستور 7-1 SELECT	
شست و شوی چمبر WBC/RBC_ دستور 7-2 SELECT	

## نگهداشت فصلی - به ازای هر ۷۵۰۰ تست

شستشوی SRV برطبق دستور العمل	
------------------------------	--

شرکت فنی مهندسی روشن طب سپینا

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۲۳۰۳۲۶۰۵    ۰۹۱۲۴۸۵۰۲۰۹    ۰۹۱۰۸۶۰۹۸۲۷

شرکت ثالث خدمات پس از فروش

۰۲۱-۶۶۰۴۲۷۲۱    ۰۲۱-۶۶۰۹۸۳۴۲

دستگاه های SELECTRA - SYSMEX - HITACHI